

Ürünler

FS-L1901D FS-L2401D FS-P2601D FS-P2602D
FS-P2603D FS-L3201D FS-L4201D FS-L5501D

Önlemler

- Temizlemeye başlamadan önce, ön filtreyi silerken istemeden dokunmatik kontrol panelinin etkin hale gelmesini önlemek için monitörü bekleme konumuna getiriniz. Bekleme konumunda dokunmatik kontrol paneli etkin duruma gelmemektedir. Monitörü tekrar etkin duruma getirmek için, bekleme tuşuna tekrardan basınız.
- Ön filtreyi veya LCD ekrana hasar vermemek veya çizmemek için özen gösteriniz.
- Ön filtreye değebilecek yüzük veya diğer takılara dikkat ediniz.
- Ön filtre veya LCD ekran üzerine bastırmayınız.
- Sıvıların cihaz içerisine girerek içerdeki elektronik parçalara hasar verebileceğinden dolayı, sıvıyı doğrudan ön filtreye, ekrana veya muhafazaya uygulamayınız veya sıkmayınız. Bunun yerine sıvıyı bir temizleme bezinin üzerine uygulayınız.
- Kan ve vücut sıvılarına el sürülmesi hakkındaki hastane talimatlarına uyunuz.
- Monitör steril ortamda dezenfekte edilmemeli veya paketlenmemelidir.
- Kurulumdan önce monitörün dezenfekte edilmesi gerekiyorsa, hastane talimatlarına uyunuz.

Ön Filtre

Aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Kuru, tüy bırakmayan, aşındırıcı olmayan yumuşak pamuklu bez ile tozunu alınız.
2. Parmak izlerini veya yağı, içme suyu veya kaplanmış cam yüzeyler için uygun yumuşak bir ticari cam temizleme ürün ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan, aşındırıcı olmayan yumuşak pamuklu bez ile siliniz.
3. Kuru bir bez yardımıyla nazikçe kurulayınız.

Aşağıdaki ürünler test edilmiş ve onaylanmıştır:

- 'Misty Clear Lemon 10' Dezenfektan
- 'Bohle' cam temizleyici
- 'Zep' sanayi tipi cam & yüzey temizleyici
- 'Klear Screen'
- 'Screen TFT' (Kontakt Chemie)
- 'Incidin Foam' (Ecolab)
- 'Microzid'
- Yumuşak bir deterjan

- Konsantrasyonu %5'ten düşük bir izopropil alkol
- Ev tipi beyazlatıcı (genel kullanım sodyum hipoklorit, 1:10 ve 1:100 aralığında su ile sulandırılmış %5.25 sodyum hipoklorit solüsyonlar)

KULLANMAYINIZ:

- Konsantrasyonu %5'ten yüksek Alkol/Çözücü maddeler
- Güçlü alkalinler, güçlü çözücü maddeler
- Asitler
- Florür içeren deterjanlar
- Amonyak içeren deterjanlar
- Aşındırıcı madde içeren deterjanlar
- Bulaşık teli
- Aşındırıcı madde içeren süngerler
- Çelik bıçaklar
- Çelik lif içeren bezler

Muhafaza

Aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Muhafazayı, tıbbi ekipmanlar için bilinen bir temizleme ürün ile hafifçe nemlendirilmiş olan yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyiniz.
2. Sadece su kullanarak tekrar siliniz.
3. Kuru bir bez yardımıyla kurulayınız.
4. Muhafaza aşağıdaki ürünler ile test edilmiş ve onaylanmıştır:

- 'Virex' kullanıma hazır dezenfektan temizleyici
- 'Misty Clear Lemon 10' dezenfektan temizleyici
- 'Misty' çok amaçlı dezenfektan temizleyici
- 'Misty' çok amaçlı dezenfektan temizleyici II
- 'Bohle' cam temizleyici
- 'Zep' sanayi tipi cam & yüzey temizleyici
- 'Klear Screen'
- 'Screen TFT' (Kontakt Chemie)
- 'Incidin Foam' (Ecolab)
- 'Microzid'
- Yumuşak bir deterjan
- Konsantrasyonu %5'ten düşük bir izopropil alkol
- Ev tipi beyazlatıcı (genel kullanım sodyum hipoklorit, 1:10 ve 1:100 aralığında su ile sulandırılmış %5.25 sodyum hipoklorit solüsyonlar)
- Hassas Hastane Süngeri Temizleme Dezenfektanı